

TOSI®-LUMCHECK

ROUTINEKONTROLLE UND VALIDIERUNG DER REINIGUNGSLEISTUNG FÜR
HOHLKÖRPERINSTRUMENTE - NACH EN ISO 15883

Leistungsmerkmale:

- Fertigtest zur Kontrolle der Reinigungsleistung
- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
- Zerlegbarer Prüfkörper für die visuelle Kontrolle
- Prüfkörper simuliert ein Hohlkörperinstrument

2 WEGE, HOHLKÖRPERINSTRUMENTE ZU REINIGEN:

AUFBEREITUNG VON HOHLKÖRPER- INSTRUMENTEN IM RDG

Hohlkörperinstrumente werden in speziellen
Einschubwägen im RDG aufbereitet.

Fragestellung?

Wird angetrocknetes Blut vom RDG
Reinigungsprozess aus Hohlkörpern entfernt?

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
AUFBEREITUNG VON HOHLKÖRPER- INSTRUMENTEN IM ULTRASCHALLBAD

Hohlkörperinstrumente werden in speziellen
Ultraschallreinigungsgeräten aufbereitet.

Fragestellung?

Kann die Ultraschallreinigung angetrocknetes
Blut sicher aus Hohlkörpern entfernen?

AUSWERTUNG:



Gute Reinigungsleistung
innerhalb des Lumens.
Die Testanschmutzung
ist vollständig entfernt.



Fibrinreste sind
zurückgeblieben.
Das Instrument wurde
durchspült aber die Lei-
stung ist zu schwach für
die nötige Reinigung.
Der Prozess muss
optimiert werden.



Keine Reinigungs-
leistung innerhalb des
Lumens!
Korrekten Anschluss
und Durchspülung
kontrollieren.

Art.Nr.: TOSI® LumCheck
Plättchen - 8303
Prüfkörper - 8305
25 Stück

